

Οδηγίες εφαρμογής χειρουργικής μάσκας



Η απλή χειρουργική μάσκα αποτελεί ένα φυσικό φραγμό σε υγρά και μεγάλα σταγονίδια του αναπνευστικού. Εφόσον χρησιμοποιείται σωστά προστατεύει από τη μετάδοση αναπνευστικών νοσημάτων που μεταδίδονται με σταγονίδια



- 1 επιλογή του σωστού μεγέθους.
- 2 εφαρμογή της υγιεινής των χεριών πριν την τοποθέτηση της μάσκας.
- 3 εφαρμογή της μάσκας στο πρόσωπο έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι (χωρίς κενά).
- 4 πίεση του μεταλλικού στοιχείου στη ράχη της μύτης.
- 5 ασφάλιση με τα κορδόνια στη μεσότητα του πίσω μέρους της κεφαλής και του λαιμού. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς βρόγχους αυτοί εφαρμόζονται γύρω από τα αυτιά.
- 6 αποφυγή επαφής της μάσκας μετά την τοποθέτηση, αλλιώς εφαρμογή της υγιεινής των χεριών πριν και μετά την επαφή.
- 7 αφαίρεση της μάσκας πιάνοντας μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και μετά από πάνω. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς βρόγχους αφαιρείται πιάνοντας ταυτόχρονα τους βρόγχους, προσοχή!
- 8 απόρριψη στον ειδικό κάδο για μολυσματικά αντικείμενα.
- 9 εφαρμογή της υγιεινής των χεριών.
- 10 αποφυγή επαναχρησιμοποίησης της μάσκας (είναι μιας χρήσης).
- 11 αφαίρεση, απόρριψη και αλλαγή στην περίπτωση που είναι ρυπαρή ή κατεστραμμένη.